

Produktinformationen 99 Suction Block Einwegprodukt



Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Bident GmbH
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg
info@blackforestbident.com
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983

Einwegprodukt

Anzahl der Anwendungen : Nur einmal verwendbar

Material : Flexibles Material

Inhalt : 20 Stück pro Box

Funktion : Mundöffnung & Absaugung


Größen : Medium (Standard)

Vorteil : Wartungsfrei & Hygienisch



99 Suction Block Bauteile

- 1 Absaugöffnung zur Mundhöhle (dorsal)
- 2 Anschluss für Einweg-Absaugkanüle
- 3 Oberteil
- 4 Unterteil
- 5 Untere Absaugöffnung

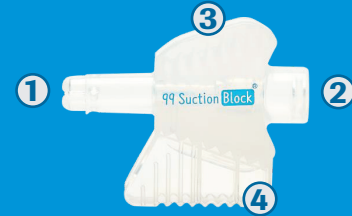

Anwendung mit Einweg-Absaugkanüle




Absaugkanüle
anschließen



Absaugkanüle
soweit wie
möglich zur
Seite biegen



Absaugkanüle
am LVE
anschließen

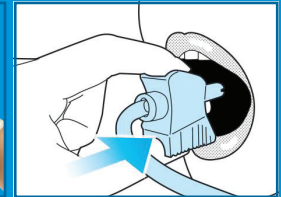


Auf gegenüber-
liegender Seite
des Behand-
lungsbereichs
einsetzen

Grundlegende Verwendung & Hinweise

linksseitig




rechtsseitig

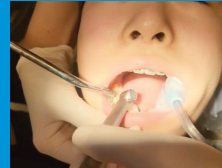

Kopf leicht zur
Blockseite neigen



Bei schwacher
Absaugung:
Lippen leicht
zusammenziehen lassen
(Saugbewegung)

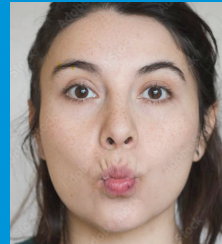

Lagerungshinweise



Temperatur

- Bei Raumtemperatur lagern (15–30 °C / 59–86 °F)
- Extreme Hitze oder Kälte vermeiden



Luftfeuchtigkeit

- In einer trockenen Umgebung aufbewahren
- Feuchte oder schlecht belüftete Bereiche vermeiden, um Schimmelbildung oder Materialabbau zu verhindern



Verpackungsintegrität

- Das Produkt in der original versiegelten Verpackung aufbewahren



Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

- UV-Licht kann zur Verfärbung oder Alterung von Silikon- und Kunststoffteilen führen
- An einem dunklen oder schattigen Ort lagern



Von Chemikalien fernhalten

- Nicht in der Nähe von Desinfektionsmitteln, Alkohol oder flüchtigen Chemikalien lagern
- Die Exposition kann zu Materialschäden oder -abbau führen

99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:  **BLACK FOREST**
BioDENT



Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Biodent GmbH
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg
info@blackforestbiodent.com
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983