



Produktinformationen

99 Suction Block

Autoklavierbar

Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Bident GmbH
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg
info@blackforestbident.com
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983

Autoklavierbar

Anzahl der Anwendungen : Bis zu 50 Mal wiederverwendbar

Material : 100 % Silikon

Inhalt : 5 Stück pro Box

Funktion : Mundöffnung & Absaugung

Größen : Small, Medium, Large, X-Large

Vorteil : Geringe Kosten



99 Suction Block®

DENTZONE®


Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

99 Suction Block Bauteile

- 1 Absaugöffnung zur Mundhöhle (dorsal)
- 2 Anschluss für Einweg-Absaugspitze
- 3 Oberteil
- 4 Unterteil
- 5 Untere Absaugöffnung

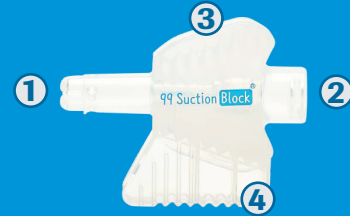

Special Connector

Anzahl der Anwendungen : Wiederverwendbar

Material : 100 % Silikon & SUS

Funktion : Absaugung

Kompatibilität : Anwendbar mit LVE & HVE



Merkmale des Special Connectors

1. Kompatibel mit LVE & HVE
2. Anschluss für 99 Suction Block
3. Einweg-Plastiküberzug bei jedem Patienten auswechseln



Größenauswahl für den 99 Suction Block

1 Finger → Small

2 Finger → Medium (Standard)

3 Finger → Large

Mehr als 3 Finger → X-large

①



②



③



Anwendung mit Einweg-Absaugkanüle




Absaugkanüle
anschießen



Absaugkanüle
soweit wie
möglich zur
Seite biegen



Absaugkanüle
am LVE
anschießen

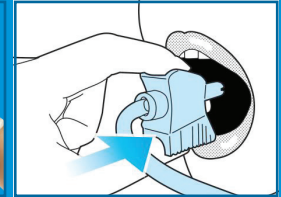

Auf gegenüber-
liegender Seite
des Behand-
lungsbereichs
einsetzen


Anwendung mit Special Connector



Special
Connector an
99 Suction Block
anschließen



Spiralförmigen Teil
des Special
Connectors
an LVE oder HVE
anschließen

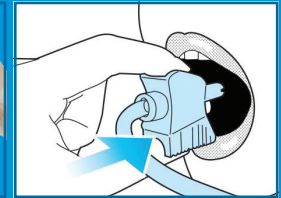

Auf gegenüber-
liegender Seite
des Behand-
lungsbereichs
einsetzen

Grundlegende Verwendung & Hinweise

linksseitig



rechtsseitig



Kopf leicht zur
Blockseite neigen



Bei schwacher
Absaugung:
Lippen leicht
zusammenziehen lassen
(Saugbewegung)




Vorsichtsmaßnahmen – Autoklavierbar



Max. 50 Anwendungen



Sterilisation
bei 135 °C für 3 Minuten
oder 121 °C für 20 Minuten

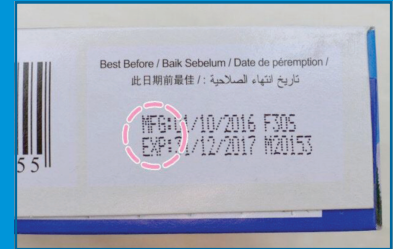

Nach Öffnung
innerhalb von 6 Monaten
verwenden


Reinigungsmethode



Spülen & Bürsten



Ultraschallreinigung
(3–10 Min. mit Enzymlösung)

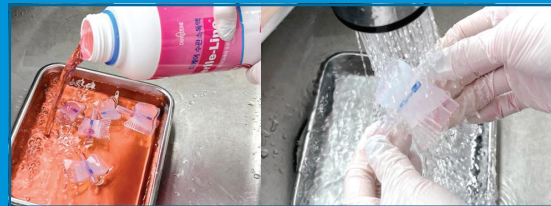

(Optional) Desinfektion mit
Peressigsäurelösung $\leq 2\%$



Gründlich trocknen



In Sterilisationsbeutel
verpacken



Autoklavieren
bei 121 °C (15–20 Min.)

Ultraschallreiniger & Desinfektion



- Empfohlene Temperatur: 40–60 °C
- Dauer: 3–10 Min.
- Geeignete Reinigungsmittel: Neutral oder Enzymatisch
- Desinfektion: Peressigsäurelösung $\leq 2\%$, 15–20 Min.

Lagerungshinweise



Temperatur

- Bei Raumtemperatur lagern (15–30 °C / 59–86 °F)
- Extreme Hitze oder Kälte vermeiden



Luftfeuchtigkeit

- In einer trockenen Umgebung aufbewahren
- Feuchte oder schlecht belüftete Bereiche vermeiden, um Schimmelbildung oder Materialabbau zu verhindern



Verpackungsintegrität

- Das Produkt in der original versiegelten Verpackung aufbewahren
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, kann eine erneute Sterilisation vor der Verwendung erforderlich sein



Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

- UV-Licht kann zur Verfärbung oder Alterung von Silikon- und Kunststoffteilen führen
- An einem dunklen oder schattigen Ort lagern



Von Chemikalien fernhalten

- Nicht in der Nähe von Desinfektionsmitteln, Alkohol oder flüchtigen Chemikalien lagern
- Die Exposition kann zu Materialschäden oder -abbau führen

99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:  **BLACK FOREST**
BioDENT

99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:  **BLACK FOREST**
BioDENT



Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Biodent GmbH
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg
info@blackforestbiodent.com
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983