



Produktinformationen 99 Suction Block Autoklavierbar

Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Ihre Praxis. Unsere Erfahrung.
Gemeinsamer Erfolg.

Black Forest Biodent GmbH
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg
info@blackforestbiodent.com
Tel +49 821 5678859 • Fax +49 821 5678983

Autoklavierbar

Anzahl der Anwendungen : Bis zu 50 Mal wiederverwendbar

Material : 100 % Silikon

Inhalt : 5 Stück pro Box

Funktion : Mundöffnung & Absaugung

Größen : Small, Medium, Large, X-Large

Vorteil : Geringe Kosten




99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:  **BLACK FOREST**
BioDENT

99 Suction Block Bauteile

- 1 Absaugöffnung zur Mundhöhle (dorsal)
- 2 Anschluss für Einweg-Absaugspitze
- 3 Oberteil
- 4 Unterteil
- 5 Untere Absaugöffnung

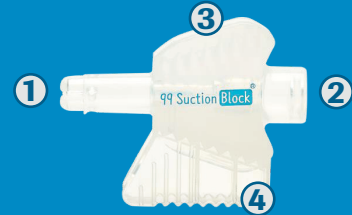

Special Connector

Anzahl der Anwendungen : Wiederverwendbar

Material : 100 % Silikon & SUS

Funktion : Absaugung

Kompatibilität : Anwendbar mit LVE & HVE



99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT

Merkmale des Special Connectors

1. Kompatibel mit LVE & HVE
2. Anschluss für 99 Suction Block
3. Einweg-Plastiküberzug bei jedem Patienten auswechseln



Größenauswahl für den 99 Suction Block

1 Finger → Small

2 Finger → Medium (Standard)

3 Finger → Large

Mehr als 3 Finger → X-large

①



②



③



Anwendung mit Einweg-Absaugkanüle




Absaugkanüle
anschließen



Absaugkanüle
soweit wie
möglich zur
Seite biegen



Absaugkanüle
am LVE
anschließen

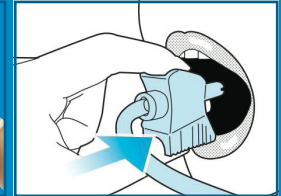

Auf gegenüber-
liegender Seite
des Behand-
lungsbereichs
einsetzen

99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:



BLACK FOREST
BioDENT


Anwendung mit Special Connector



Special Connector an 99 Suction Block anschließen



Spiralförmigen Teil des Special Connectors an LVE oder HVE anschließen

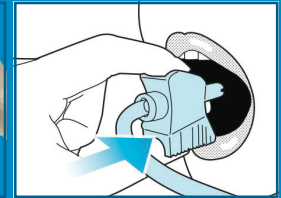

Auf gegenüberliegender Seite des Behandlungsbereichs einsetzen

Grundlegende Verwendung & Hinweise

linksseitig



rechtsseitig



Kopf leicht zur
Blockseite neigen



Bei schwacher
Absaugung:
Lippen leicht
zusammenziehen lassen
(Saugbewegung)



99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:

 **BLACK FOREST**
BioDENT