

# 99 Suction Block - Autoklavierbar

Aufbereitungsanleitung und Lagerhinweise (gemäß Hersteller Dentozone)



Spülen & Bürsten



Ultraschallreinigung  
(3–10 Min. mit Enzymlösung)



(Optional) Desinfektion mit  
Peressigsäurelösung  $\leq 2\%$



Gründlich trocknen



In Sterilisationsbeutel  
verpacken



Autoklavieren: 121 °C für 15–20 Minuten  
ODER 135 °C für 3 Minuten

Authorized Representative (EC Rep.)  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
located in C/Horacio Lengo, 18,  
29006, Málaga, Spain

Hersteller:

**DENTZONE**<sup>®</sup>

Dentozone  
Ace High-End Tower 1, Digital-ro 26-gil 5,  
Guro-gu, Seoul 1011, South Korea

Vertrieb durch:

**BLACK FOREST**  
BioDENT

Black Forest Biodent GmbH  
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg  
[www.blackforestbiodent.com](http://www.blackforestbiodent.com)

# Lagerungshinweise



## Temperatur

- Bei Raumtemperatur lagern (15–30 °C / 59–86 °F)
- Extreme Hitze oder Kälte vermeiden



## Luftfeuchtigkeit

- In einer trockenen Umgebung aufbewahren
- Feuchte oder schlecht belüftete Bereiche vermeiden, um Schimmelbildung oder Materialabbau zu verhindern



## Verpackungsintegrität

- Das Produkt in der original versiegelten Verpackung aufbewahren
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, kann eine erneute Sterilisation vor der Verwendung erforderlich sein



## Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

- UV-Licht kann zur Verfärbung oder Alterung von Silikon- und Kunststoffteilen führen
- An einem dunklen oder schattigen Ort lagern



## Von Chemikalien fernhalten

- Nicht in der Nähe von Desinfektionsmitteln, Alkohol oder flüchtigen Chemikalien lagern
- Die Exposition kann zu Materialschäden oder -abbau führen

Authorized Representative (EC Rep.)  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
located in C/Horacio Lengo, 18,  
29006, Málaga, Spain

Hersteller:

**DENTZONE**<sup>®</sup>

Dentozone  
Ace High-End Tower 1, Digital-ro 26-gil 5,  
Guro-gu, Seoul 1011, South Korea

Vertrieb durch:

 **BLACK FOREST**  
BioDENT

Black Forest Biodent GmbH  
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg  
[www.blackforestbiodent.com](http://www.blackforestbiodent.com)