

# 99 Suction Block - Autoklavierbar

## Aufbereitungsanleitung und Lagerhinweise



Spülen & Bürsten



Ultraschallreinigung  
(3–10 Min. mit Enzymlösung)



(Optional) Desinfektion mit  
Peressigsäurelösung  $\leq 2\%$



Gründlich trocknen



In Sterilisationsbeutel  
verpacken



Autoklavieren  
bei 121 °C (15–20 Min.)

99 Suction Block®

DENTZONE®

Vertrieb durch:

 **BLACK FOREST**  
BioDENT

Black Forest Biodent GmbH  
Zimmererstrasse 26d • 86153 Augsburg  
info@blackforestbiodent.com  
Tel +49 821 5678859  
Fax +49 821 5678983

# Lagerungshinweise



## Temperatur

- Bei Raumtemperatur lagern (15–30 °C / 59–86 °F)
- Extreme Hitze oder Kälte vermeiden



## Luftfeuchtigkeit

- In einer trockenen Umgebung aufbewahren
- Feuchte oder schlecht belüftete Bereiche vermeiden, um Schimmelbildung oder Materialabbau zu verhindern



## Verpackungsintegrität

- Das Produkt in der original versiegelten Verpackung aufbewahren
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, kann eine erneute Sterilisation vor der Verwendung erforderlich sein



## Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

- UV-Licht kann zur Verfärbung oder Alterung von Silikon- und Kunststoffteilen führen
- An einem dunklen oder schattigen Ort lagern



## Von Chemikalien fernhalten

- Nicht in der Nähe von Desinfektionsmitteln, Alkohol oder flüchtigen Chemikalien lagern
- Die Exposition kann zu Materialschäden oder -abbau führen

